



FONDATION SUISSE POUR LES TELETHESES
STIFTUNG FÜR ELEKTRONISCHE HILFSMITTEL
FONDAZIONE SVIZZERA PER LE TELETESI
SWISS FOUNDATION FOR REHABILITATION TECHNOLOGY

*La technologie au service de la personne en situation de handicap.
Die Technologie im Dienste des Menschen mit Behinderung.*

Eco Talker-14

Der EcoTalker-14 ist unsere leistungsfähigste Kommunikationshilfe für nichtsprechende Menschen. Er ermöglicht freie und grammatikalisch korrekte Kommunikation auf vielerlei Weisen:

- Vorgespeichertes Vokabular kann schnell und flexibel über Ikonenfolgen abgerufen werden.
- Bilder und Symbole können mit Aussagen belegt und im Display aktiviert werden.
- Seiten können dynamisch untereinander oder mit Ikonensequenzen verknüpft werden.
- Wörter können buchstabenweise eingegeben werden. Zwei Wortvorhersagesysteme beschleunigen die Eingabe.

Leistungsmerkmale

- großes 14"-Display
- mögliche Feldaufteilungen: 4, 8, 15, 45, 60, 84 und 144 Felder
- Abdeckgitter für 45, 60, 84 und 144 Felder erhältlich
- leicht auslösendes Touchscreen für direkte Selektion der Tastatur auf dem Display
- synthetische Sprachausgabe der neuesten Generation und natürliche Sprachausgabe
- 6 getrennte Benutzerbereiche für unabhängige Vokabulare und Ansteuerungsoptionen
- einfaches Sichern und Laden von Vokabular und Einstellungen sowie Import von Bildern via USB-Stick
- Wiedergabe von MP3-Dateien
- Notizbuchfunktion für wichtige Texte
- 2 Wortvorhersagesysteme zur Beschleunigung der Schreibgeschwindigkeit
- Umfeldsteuerung durch eingebaute, lernfähige Infrarotschnittstelle
- umfangreiche auditive Rückmeldungen speicherbar für Benutzer, die besser auf akustische als auf optische Reize reagieren
- Fremdsprachoption (Englisch, Französisch, Spanisch), zum Teil auch mit Wortvorhersage
- umfangreiches Englischvokabular im Lieferumfang enthalten
- PC-Editor (Emulation) zum Bearbeiten von Benutzervokabular



Erfolgreich zur eigenen Sprache

Der EcoTalker verfügt über eine Vielzahl von vorgeschichteten Vokabularen (Anwendungsprogramme). Je nach motorischen, perzeptiven und/oder kognitiven Möglichkeiten kann die "Quasselkiste 45", die "Wortstrategie 84" oder die "Wortstrategie 144" zur Kommunikation genutzt werden. Die "Wortstrategie 144" ist die auf den EcoTalker portierte Version der bekannten „Deutsche Wortstrategie“ mit ca. 3.000 vorgeschichteten Wörtern der deutschen Sprache. Dieses Anwendungsprogramm wird von Hunderten von Benutzern in Deutschland tagtäglich erfolgreich zur Umsetzung ihrer kommunikativen Bedürfnisse verwendet und bietet unübertroffene Möglichkeiten, sich schnell und präzise sprachlich mitzuteilen.

FST
Hauptsitz/Siège principal
Charmettes 10b – CP
CH – 2006 Neuchâtel 6
Tél. +41 (0)32 732 97 77 (f)
Tel. +41 (0)32 732 97 97 (d)
Fax +41 (0)32 730 58 63
Banque: BCN – Z 3521.16.43

FST Zweigstelle Nottwil
c/o Schweizer
Paraplegiker-Zentrum
Guido A. Zäch Strasse 1
CH – 6207 Nottwil
Tel. +41 (0)41 939 62 80
Fax +41 (0)41 939 62 81

FST Zweigstelle Brissago
c/o Clinica Hildebrand
via Crodolo
CH – 6614 Brissago
Tel. +41 (0)91 786 87 88

FST Zweigstelle Basel
c/o Rehab Basel
Im Burgfelderhof 40
Postfach - 4055 Basel
Tél. +41 (0)61 325 07 08





FONDATION SUISSE POUR LES TELETHESES
STIFTUNG FÜR ELEKTRONISCHE HILFSMITTEL
FONDAZIONE SVIZZERA PER LE TELETESI
SWISS FOUNDATION FOR REHABILITATION TECHNOLOGY

La technologie au service de la personne en situation de handicap.

Die Technologie im Dienste des behinderten Menschen.

Ansteuerung

- direkte Ansteuerung durch Drücken der Tasten auf dem Display
- direkte Ansteuerung durch Auswählen von Feldern mit den Augen über einen als Zubehör erhältlichen Eye-Tracker (siehe EcoEyegaze)
- direkte Ansteuerung durch Auswählen von Feldern per Tracker mit dem Kopf über einen als Zubehör erhältlichen Tracker (intern oder extern)
- direkte Ansteuerung über externe Maus-kompatible Eingabegeräte
- schrittweises Laufen durch die Felder der Tastatur mit einem digitalen Joystick
- 1- und 2-Tasten-Scanning über externe Tasten (auch drahtlos per Bluetooth)

Die Tastatur steht immer als Eingabemedium zur Verfügung.

Technische Daten

- Größe: 34×24×8 cm
- Gewicht: 3,5 kg
- Tastengröße bei 144 Feldern: 16 mm
- TFT-Display, Auflösung 1024×768 Punkte
- Lithium-Ionen-Akku für bis zu 10 Std. Betrieb
- synthetische Stimmen (männlich/weiblich)
- Ansteuerung: Tastatur, 1- oder 2-Tasten-Scanning, Joystick, externes Zeigegerät
- inkl. Aufstellfuß, Netzteil (Ladegerät), PC-Editor, USB-Stick

Lieferbares Zubehör

- PCS-Symbolsammlung (ca. 8.000 Symbole)
- METACOM-Symbolsammlung (ca. 1.500 Symbole)
- integrierter Tracker für Ansteuerung mit dem Kopf
- Abdeckgitter für 45, 60, 85 und 144 Felder
- Tragetasche mit Schultergurt
- Tisch- und Rollstuhhalterung

FST
Hauptsitz/Siège principal
Charmettes 10b – CP
CH – 2006 Neuchâtel 6
Tél. +41 (0)32 732 97 77 (f)
Tel. +41 (0)32 732 97 97 (d)
Fax +41 (0)32 730 58 63
Banque: BCN – Z 3521.16.43

FST Zweigstelle Nottwil
c/o Schweizer
Paraplegiker-Zentrum
Guido A. Zäch Strasse 1
CH – 6207 Nottwil
Tel. +41 (0)41 939 62 80
Fax +41 (0)41 939 62 81

FST Zweigstelle Brissago
c/o Clinica Hildebrand
via Crodolo
CH – 6614 Brissago
Tel. +41 (0)91 786 87 88

FST Zweigstelle Basel
c/o Rehab Basel
Im Burgfelderhof 40
Postfach - 4055 Basel
Tél. +41 (0)61 325 07 08

